

Infoblatt – SAUERSTOFFMASKEN für TIERE



S – Katzen & Kleintiere M – kleine Hunde L – große Hunde

1. Maske anschließen

1. Maske mit beiliegendem Anschlusschlauch verbinden
2. Anschlusschlauch mit Druckminderer der Sauerstoffflasche verbinden
3. Ventil öffnen



2. Durchflussmenge einstellen

Je nach Maskengröße:
S = 1 – 3 Liter Sauerstoff
M = 3 – 5 Liter Sauerstoff
L = 5 – 7 Liter Sauerstoff



3. Maske aufsetzen

Maske über Tierschnauze stülpen

